

Humasis

COVID-19 Antigen Test

Einschrittiger Diagnosetest



zugelassen und gelistet beim

BfArM
Bundesinstitut
für Arzneimittel
und Medizinprodukte


evaluiert und gelistet beim

PEI – Paul Ehrlich Institut
Bundesinstitut
für Impfstoffe und
biomedizinische Arzneimittel


**Für professionelle
Anwendung.**

www.goodscare.com

Testkit-Komponenten

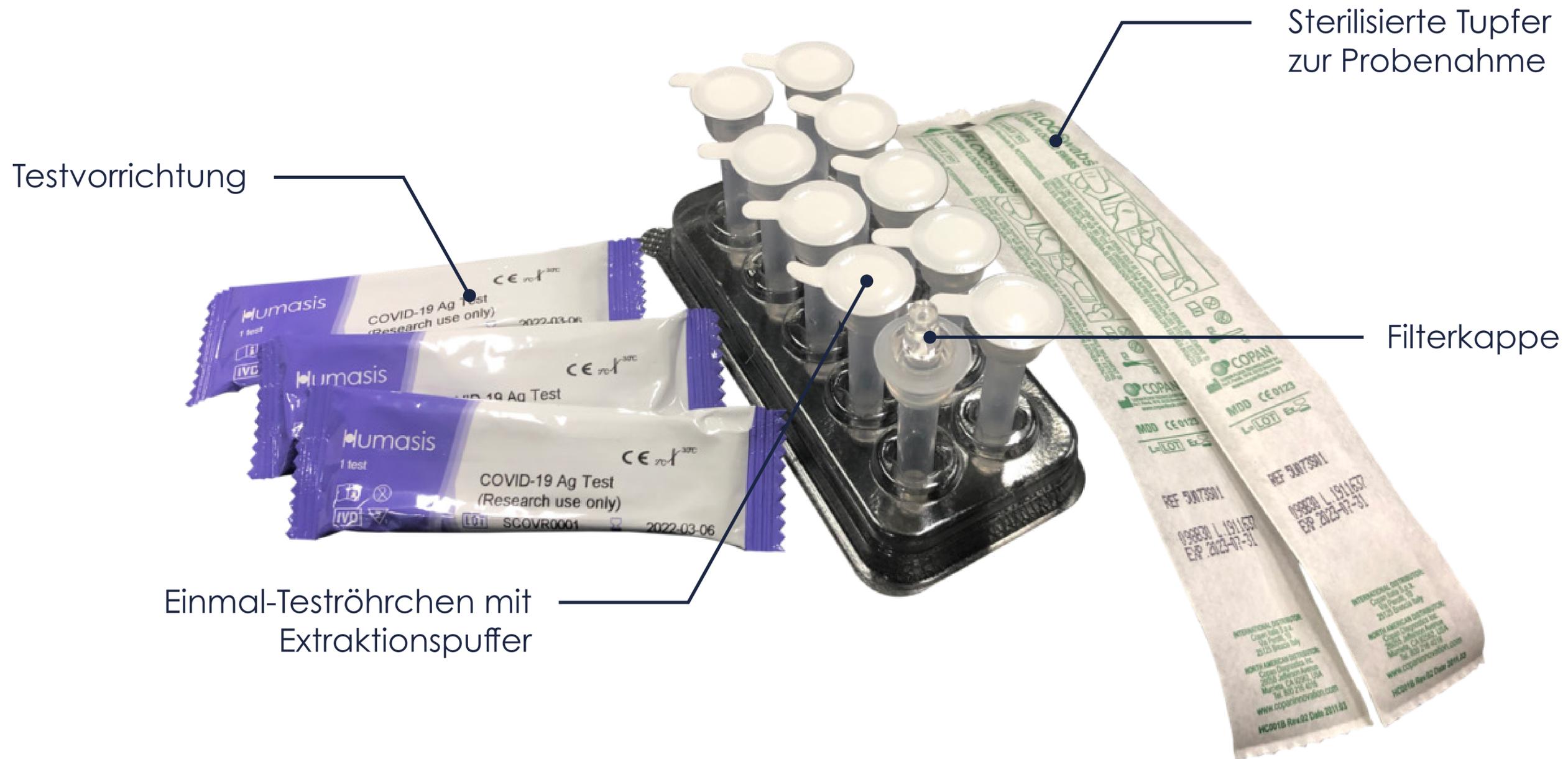


Probenahme (Nasopharyngeal)

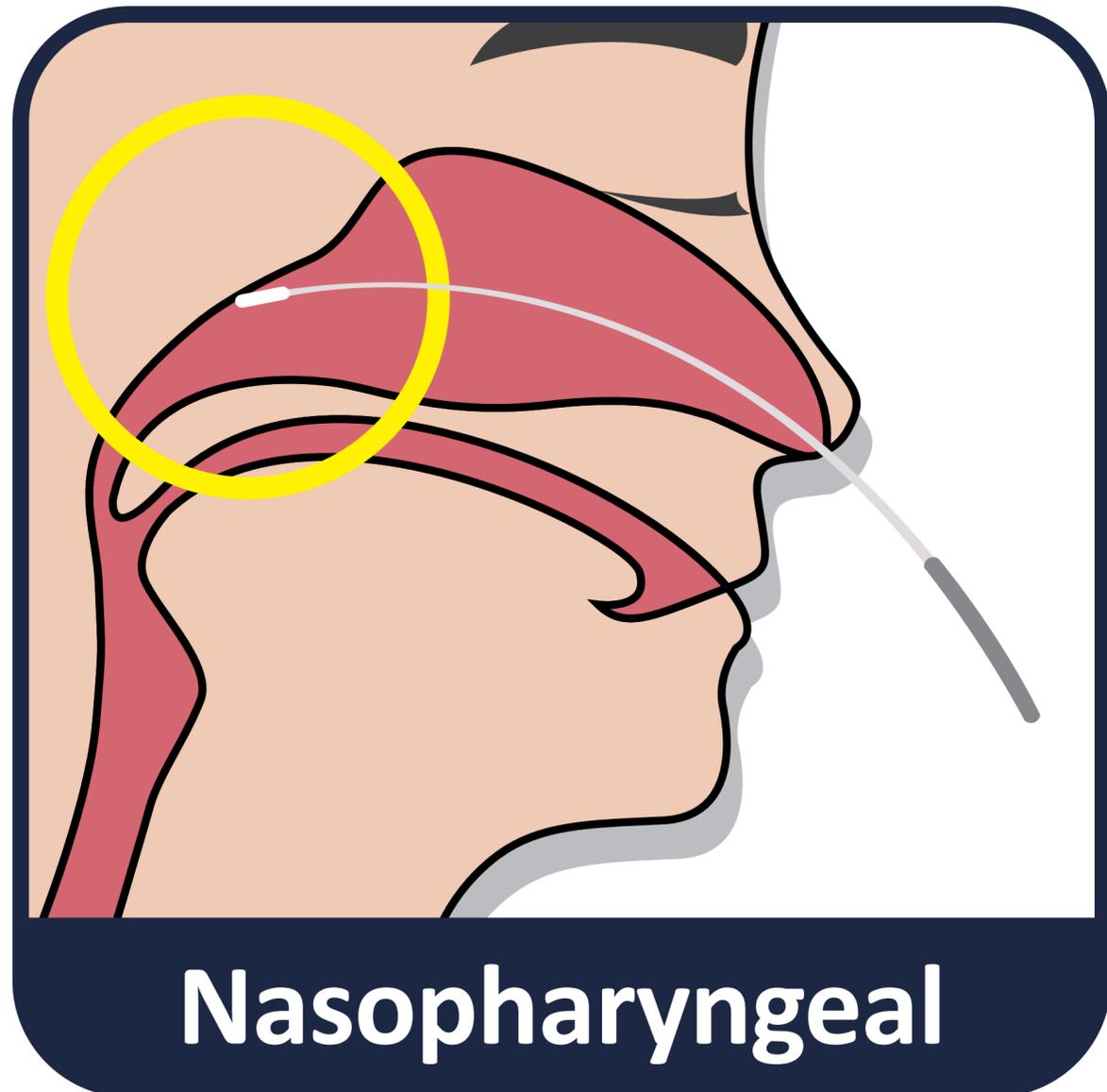



1. Verwenden Sie den im Paket enthaltenen Tupfer zur nasopharyngealen Probenahme.
2. Die gesammelten Proben sollten sofort nach der Entnahme getestet werden, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Probenahme (Nasal)


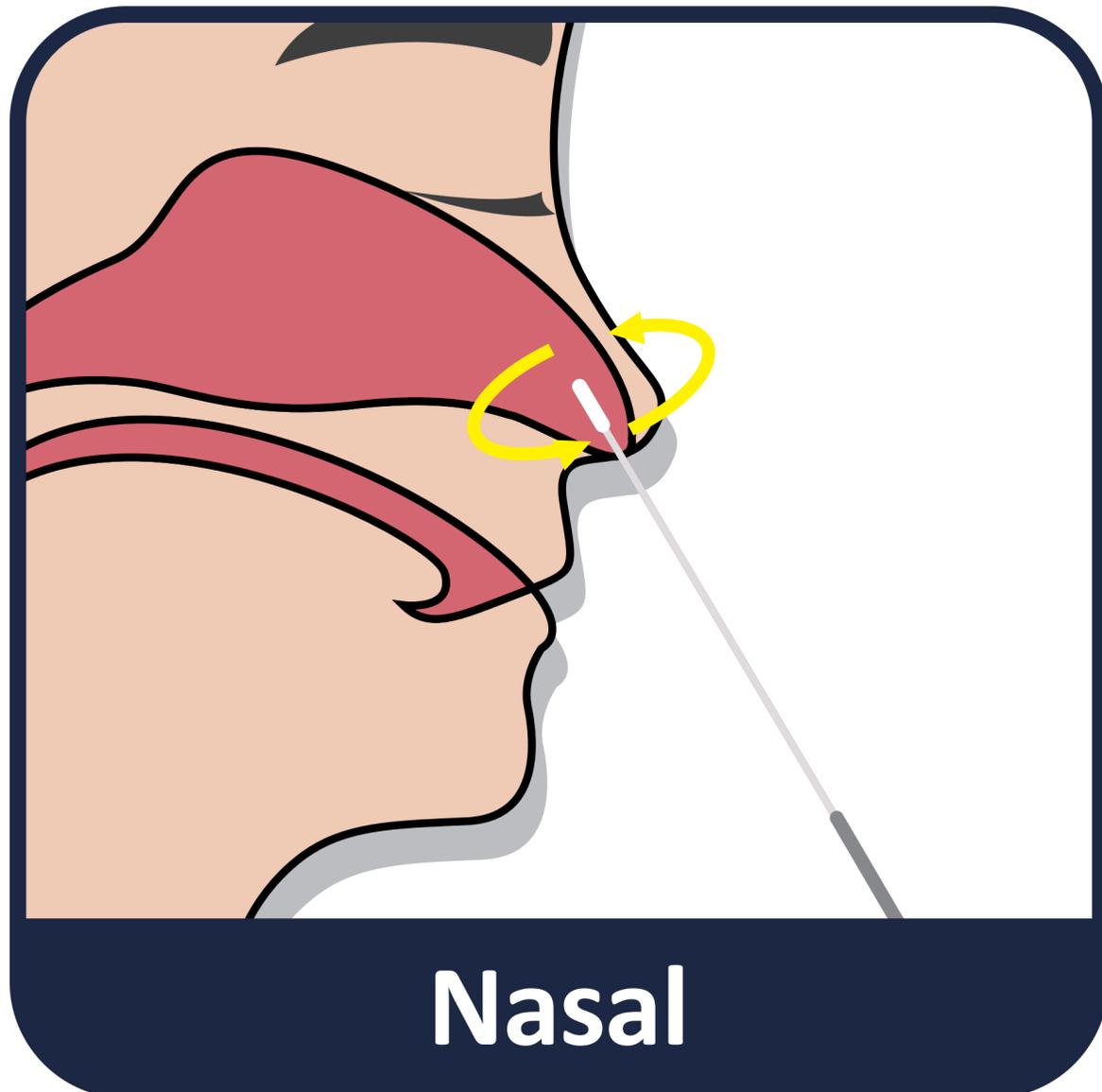


1. Führen Sie den Abstrichtupfer 2-2,5 Zentimeter in das linke Nasenloch ein und zirkeln Sie ihn 5 Mal oder mindestens 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen fest gegen die Nasenwand.
2. Führen Sie im Anschluss dasselbe im rechten Nasenloch durch.



Führen Sie die Spitze des Tupfers mit der Patientenprobe ein und rühren Sie die Spitze mehr als 10 Mal um, um eine ausreichende Probenentnahme zu gewährleisten.

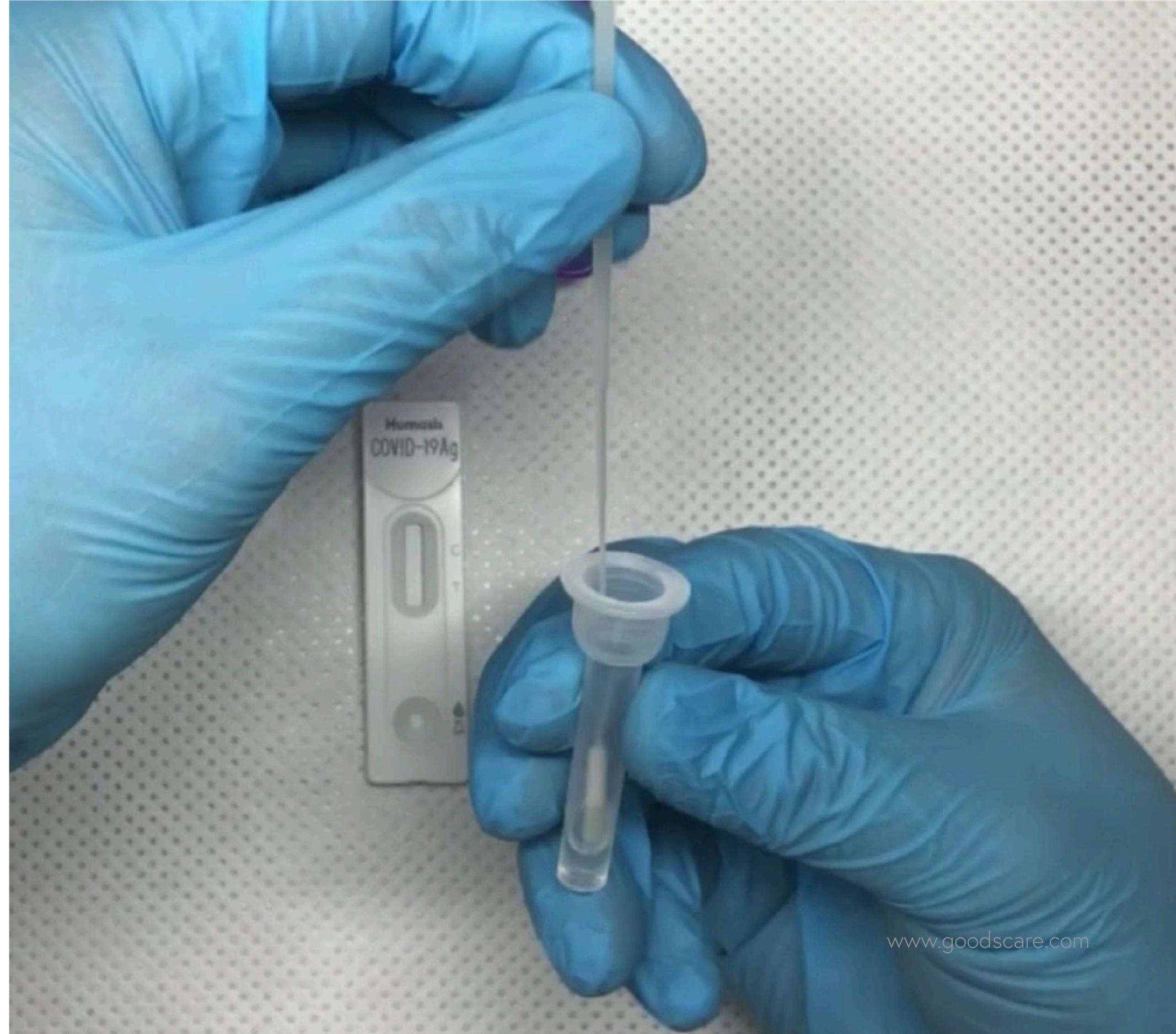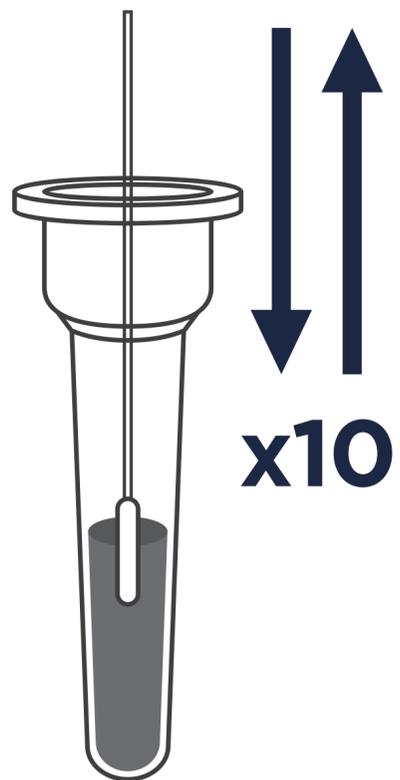



Wenn Sie den Tupfer entfernen, drücken Sie die Oberseite gegen die Rohrwand, um die extrahierte Flüssigkeit herauszudrücken.

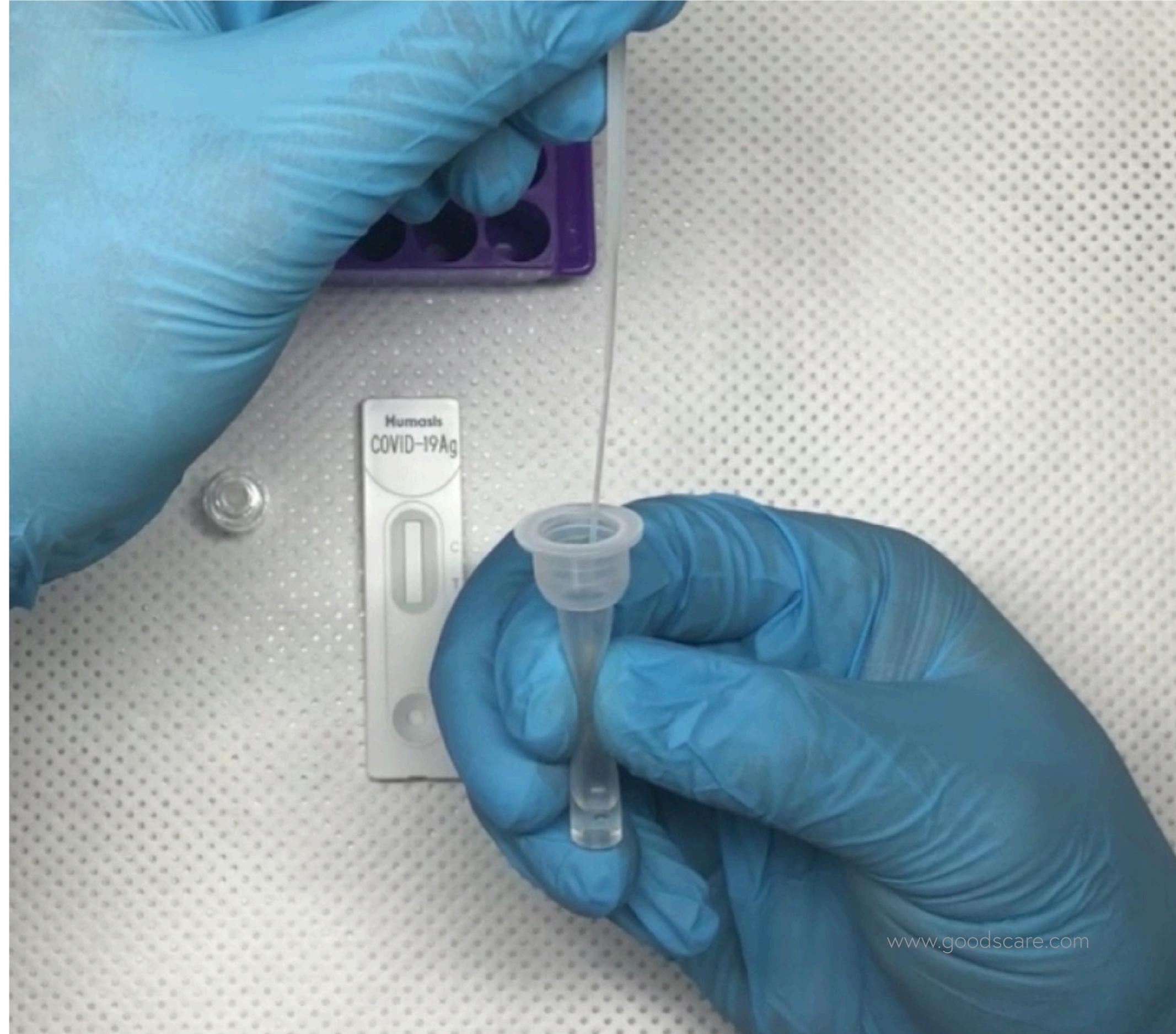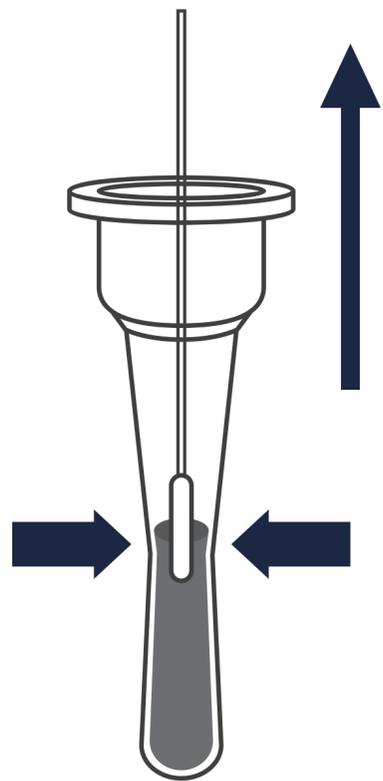

Setzen Sie die Filterkappe auf
das Teströhrchen.

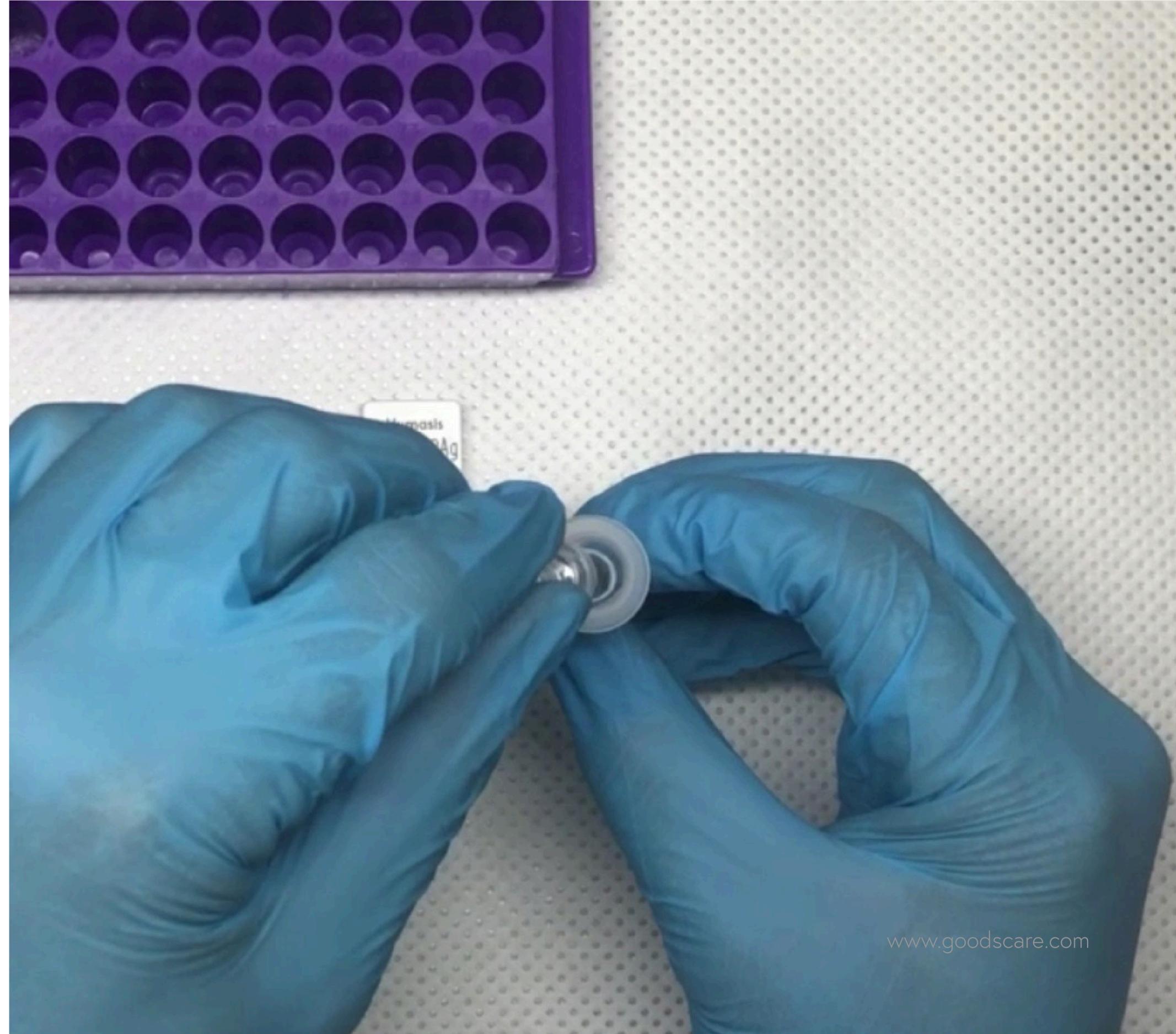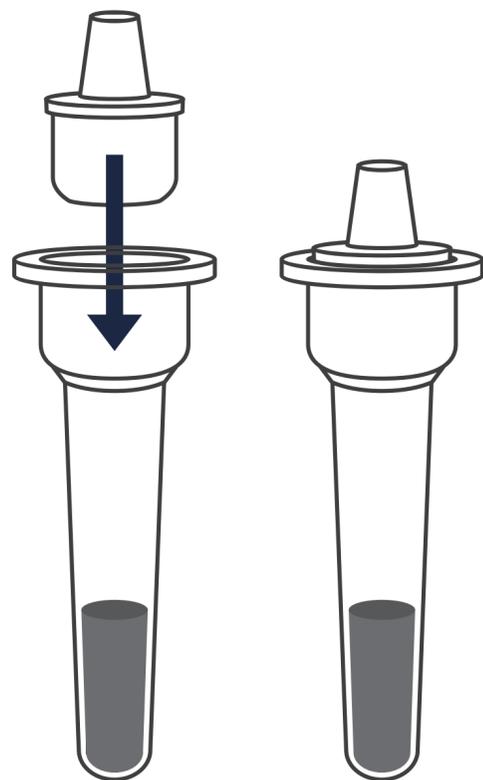

Geben Sie 3 Tropfen
Probenextrakte (90 ~100 ul)
in die Probenvertiefung des
Testgeräts.

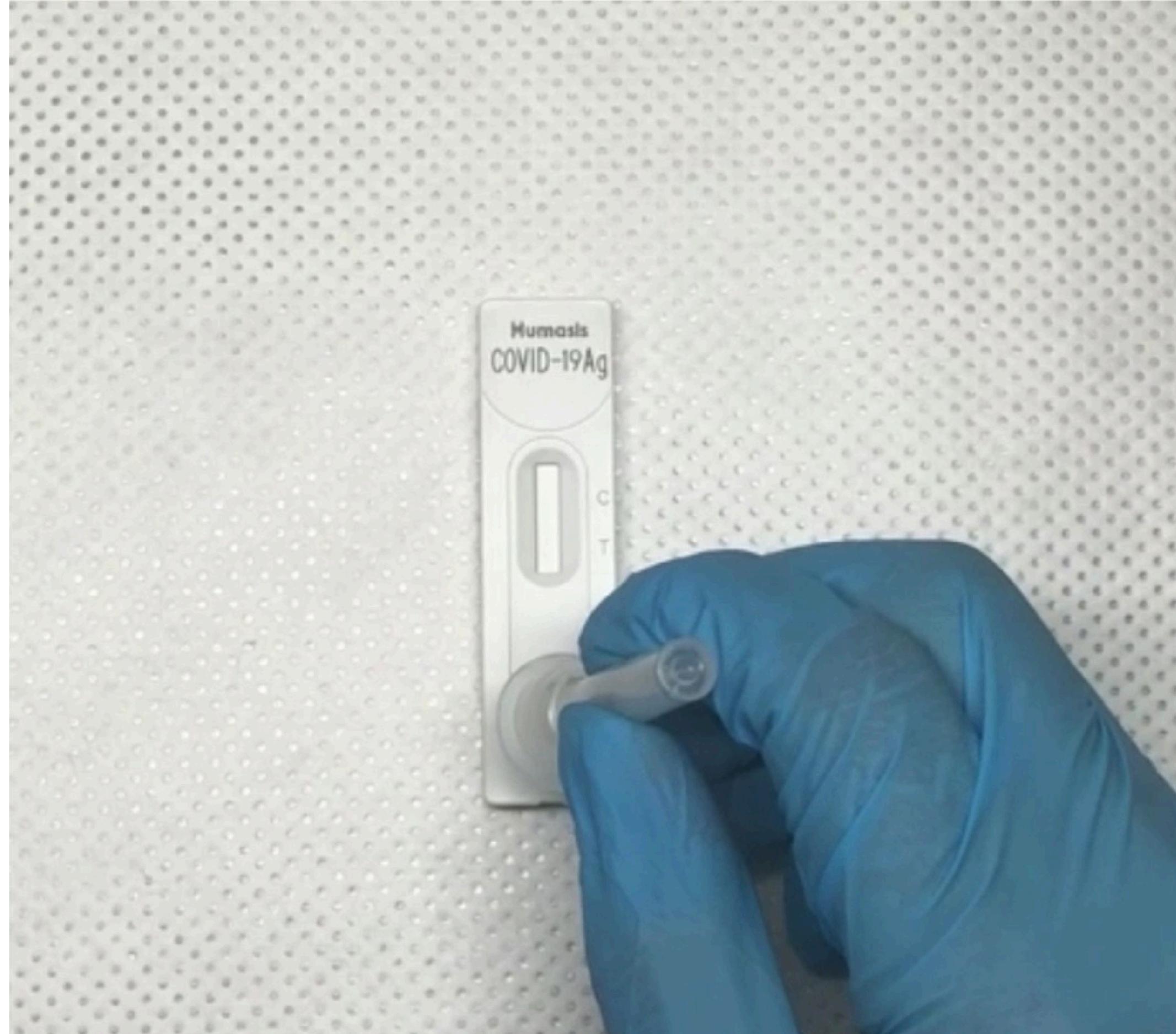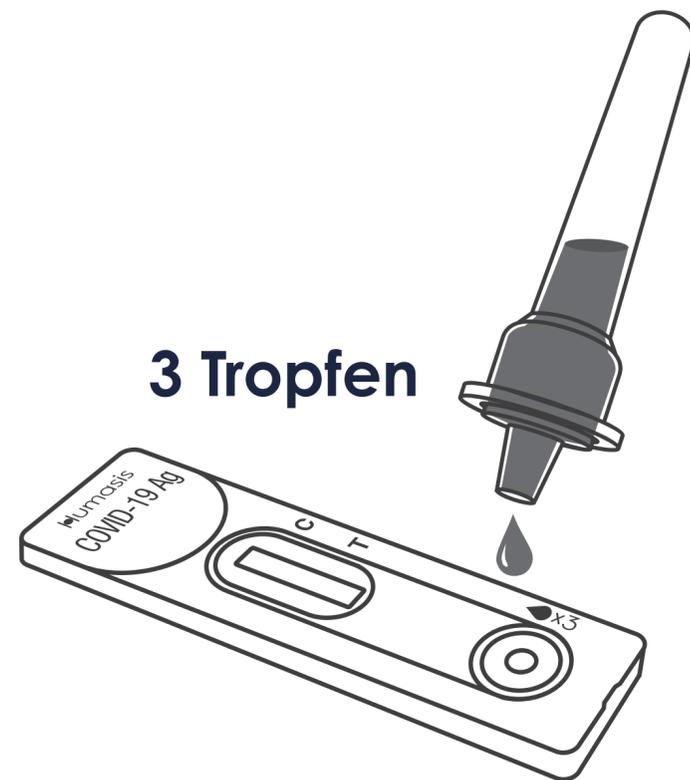



Interpretation des Ergebnisses



NEGATIV



POSITIV



UNGÜLTIG

goodscare

**we care
for your
goods.**

goodscare GmbH

am Sandtorkai 62

20457 Hamburg

Germany

T: +49 (0) 40 3680 7499-0

F: +49 (0) 40 3680 7499-5

info@goodscare.com

www.goodscare.com

Janneke Lupp

janneke.lupp@goodscare.com

T +49 (0) 40 3680 7499-12

M +49 (0) 170 24 71 811

José Scheuer

jose.scheuer@goodscare.com

T +49 (0) 40 3680 7499-16

M +49 (0) 152 34 15 87 31

Thilo Schmitz

thilo.schmitz@goodscare.com

T +49 (0) 40 3680 7499-13

M +49 (0) 1577 14 18 341

gdc